

## Osobiste urządzenie wspomagające słyszenie FM

Doskonały  
towarzysz  
Państwa aparatu  
słuchowego

- Redukuje niepożądany hałas w tle
- Wzmacnia pożądane dźwięki, zarówno bliskie jak i dalekie
- Znakomity do codziennego użytku



*Conversor*<sup>®</sup>

# Łatwe słyszenie

## wszędzie – dla wszystkich, prowadzących aktywny styl życia

Prezentujemy **Conversor** – pierwsze osobiste urządzenie wspomagające słyszenie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Daje radość słyszenia każdego dnia.

Łatwość obsługi i bezprzewodowe działanie to zalety, które sprawiają, że urządzenie jest idealne dla każdej niedosłyszącej osoby. Conversor współpracuje z aparatami słuchowymi wyposażonymi w cewkę tele, implantami ślimakowymi oraz słuchawkami.

Dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu, Conversor pozwala słyszeć pożądane dźwięki, zarówno bliskie jak i dalekie, wyciszając niepożądany hałas w tle. Sygnał docierający do ucha jest przejrzysty i bardziej zrozumiały, również w głośnym otoczeniu. Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu, jakie zapewnia Conversor, aparat słuchowy może pracować z niższym wzmocnieniem, co pozwala na wyeliminowanie zniekształceń i sprzężeń zwrotnych.

## Zaprojektowany dla łatwego i wygodnego użycia

Conversor składa się z dwóch lekkich elementów – bezprzewodowego mikrofonu FM i odbiornika. Kompaktowy, bezprzewodowy mikrofon wzmacnia dźwięk i poprawia jego jakość, a odpowiednio ustawiony przez użytkownika odbiornik umożliwia mu wyraźne usłyszenie pożądanych dźwięków. Dostępny jest tryb Kierunkowy, do rozmowy z jednym rozmówcą oraz tryb Dookólny, przydatny w czasie rozmowy z grupą osób, na przykład podczas spotkania towarzyskiego.

Bezprzewodowy mikrofon można skierować w stronę źródła dźwięku, lub ustawić na stałe w pobliżu źródła dźwięku. Może być on też trzymany przez osobę mówiącą, np. przez nauczyciela w klasie czy prelegenta na wykładzie. Maksymalna odległość między mikrofonem, a odbiornikiem wynosi 25 metrów.

Dzięki Conversorowi, użytkownicy mogą teraz korzystać z większej swobody w codziennych sytuacjach akustycznych, bez obawy o jakość słyszenia. Conversor umożliwia swobodną rozmowę w każdym otoczeniu akustycznym – w klasie, w biurze, na spotkaniach towarzyskich, w czasie prowadzenia samochodu, na zakupach czy w domu.

Korzystanie z Conversora eliminuje konieczność używania innych, kosztownych urządzeń wspomagających słyszenie, np. z systemu FM czy pętli indukcyjnej.



odbiornik



bezprzewodowy mikrofon FM

Mikrofon można także połączyć bezpośrednio z odbiornikiem radiowym, telewizyjnym, odtwarzaczami VCR/DVD/CD czy z komputerem.

Odbiornik może być dyskretnie zawieszony na szyi użytkownika pod ubraniem i połączony z aparatem słuchowym, implantem ślimakowym lub ze słuchawkami.

Jednorazowe naładowanie akumulatorów mikrofonu i odbiornika pozwala na ich ośmiogodzinną pracę. Możliwość szybkiego ich doładowania pozwala na prawie nieprzerwaną pracę urządzenia.



# Co wyróżnia Conversor?

Conversor zapewnia osobom niedosłyszącym optymalną jakość dźwięku w różnych sytuacjach akustycznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu następujących rozwiązań:

**Redukcja hałasu w tle.** Unikalna technologia pozwalająca na wyciszenie niepożądanego hałasu i dźwięków otoczenia, aż o 30 dB oraz wzmocnienie pożądanego dźwięku, co daje odbiorcy możliwość skoncentrowania się dokładnie na tym, co chce usłyszeć.

**Transmisja bezprzewodowa.** Umożliwia nieskrępowane korzystanie z urządzenia na odległość. Mikrofon


może być umieszczony blisko źródła dźwięku, dzięki czemu użytkownik otrzymuje czysty sygnał, nawet, jeśli znajduje się w odległości 25 metrów od mikrofonu.

**Tryb Kierunkowy.** Pozwala użytkownikowi na skoncentrowanie się na konkretnym źródle dźwięku. Niepożądane dźwięki z otoczenia są redukowane.

**Tryb Dookólny.** Wzmacnia dźwięki z otoczenia – jest to rozwiązanie idealne w przypadku spotkań rodzinnych i biznesowych. Przykładowo, umieszczając mikrofon centralnie na stole, można słyszeć, rozumieć i uczestniczyć w rozmowie grupy osób.



Tryb Kierunkowy

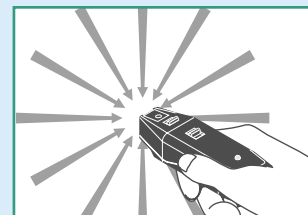

Tryb Dookólny



Aby korzystać z Conversora należy przestawić aparat słuchowy na tryb pracy cewki tele. Także mikrofon powinien zostać ustawiony w odpowiednim do potrzeb trybie.



Conversor można również używać bez aparatu słuchowego – w tym celu należy skorzystać ze słuchawek połączonych z urządzeniem przewodem z końcówką typu jack o średnicy 3.5 mm.


## Ułatwione słyszenie w różnych sytuacjach

### Głośnie, hałaśliwe otoczenie.


Conversor pozwala użytkownikowi skoncentrować się na wybranym źródle dźwięku. Redukcja hałasu w tle usuwa niepożądane dźwięki, poprawiając tym samym rozumienie mowy.

**Ciche dźwięki.** Conversor automatycznie wzmacnia dźwięki pozwalając użytkownikowi na lepsze słyszenie również cichych dźwięków, bez zbyteń wysiłku i dodatkowego wzmocnienia w aparacie słuchowym.


**Swobodna rozmowa.** Conversor przesyła wzmocniony dźwięk, co daje użytkownikowi możliwość swobodnego porozumiewania się z rodziną, przyjaciółmi, w pracy, a także np. w restauracji czy podczas jazdy samochodem.

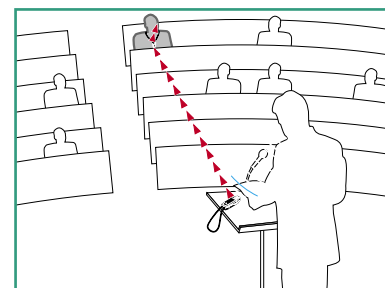


W klasie/sali konferencyjnej

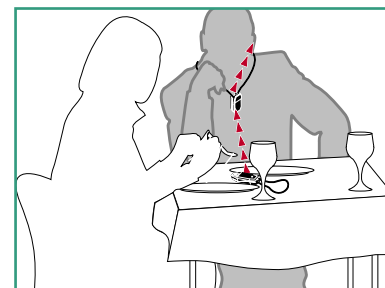

W restauracji/kawiarni

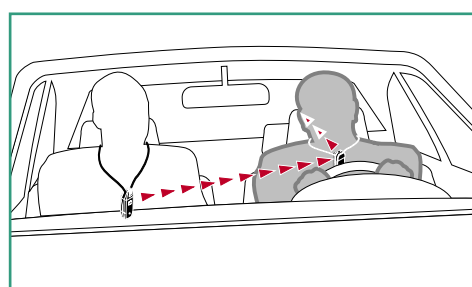


W samochodzie

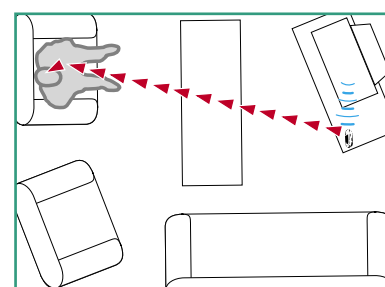

Przy oglądaniu telewizji

# Conversor – znakomity do codziennego użytku...

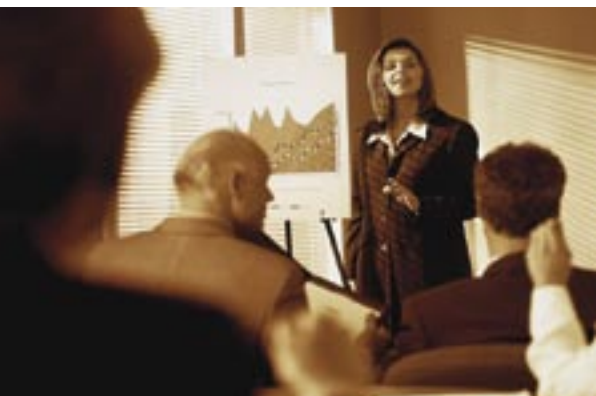

**Conversor Limited**  
Tel: +44 (0)870 066 3499  
Fax: +44 (0)870 066 3669  
info@conversorproducts.com  
[www.conversorproducts.com](http://www.conversorproducts.com)

CBR01\_POL